

Espaçador GoodDoctor

1. Nome do Produto

Espaçador GoodDoctor

2. Descrição

Dispositivo para aerossolterapia, utilizado em conjunto com inaladores dosímetros para administração eficaz de medicamentos em spray. Composto por base com encaixe universal, câmara transparente e resistente, tampa superior (bocal) e máscara anatômica e maleável.

3. Especificações Técnicas

- Composição: Polipropileno, Pigmentos, Elastômeros e Silicone;
- Capacidade da Câmara: 150 ml (transparente);
- Sistema: Bivalvulado;
- Conector: Encaixe universal;
- Máscara: Anatômica, com válvula fixa (não removível);
- Cor: Amarelo;
- Uso: Externo;
- Faixa Etária Indicada: Adultos e crianças a partir de 3 anos de idade;
- Produto livre de: Látex e Bisfenol A;
- Validade: 5 anos;
- Registro ANVISA: 82599819002;
- Esterilidade: Produto não estéril;
- Fabricante recomenda:- Uso Único.

4. Apresentação


- **Código do Produto - GD000009:**
- **Conteúdo da Embalagem:**
 - 01 Espaçador;
 - 01 Máscara com indicação adulto/infantil;
 - 01 Manual de instrução;
- **Tipo de Embalagem:** Plástica (Poliétileno - PE)
- **Cor Disponível:** Amarelo

5. Instruções de Uso

É um produto para saúde, destinado ao uso domiciliar e hospitalar, é recomendável realizar o a limpeza antes do primeiro e após cada uso.

5.1. Montagem

Imagem ilustrada

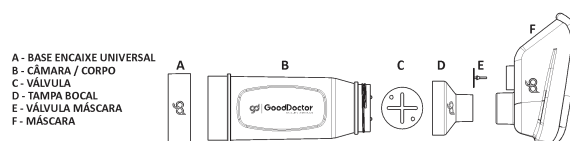


- 5.1.1 Encaixe a base (A) na câmara (B);
- 5.1.2 Com a câmara na vertical, posicione os furos laterais da válvula (C) na direção dos pinos de fixação da câmara e encaixe-os perfeitamente. Os dois lados da válvula são idênticos;
- 5.1.3 Após a fixação o da válvula (C), encaixe o bocal (D) rosqueando até o final para que o sinta firme na mesma extremidade da câmara onde foi fixada a válvula. Em seguida, encaixe firmemente a máscara (F) no dispositivo. **O produto não deve ter a válvula da máscara (parte E) removida.**



Espaçador GoodDoctor

6. Aplicabilidade

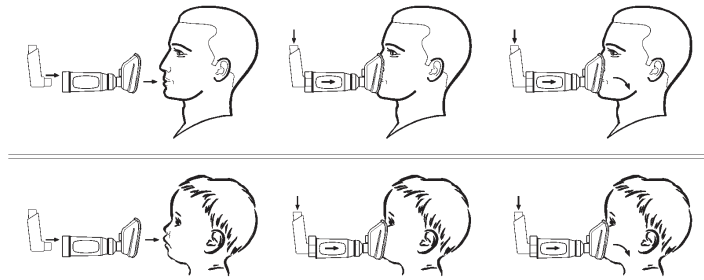

Observações: Ao finalizar a aplicação, para retirar o spray (bombinha) da base do Espaçador, fixe a base com uma das mãos e retire o spray com a outra.
Em caso de dúvidas quanto à dosagem e frequência de uso do medicamento, consulte o seu médico.

7. Higienização

6.1. Limpeza:-

- Lavar as peças (exceto válvula da máscara) com água fria corrente e detergente neutro;
- Utilizar esponja macia;
- Secagem natural, com a câmara na posição vertical.

8. Desinfecção e Esterilização

7.1. Desinfecção:-

- Imersão em Hipoclorito de Sódio (0,02% ou 0,5%) por 30 minutos.

7.2. Esterilização:-

- Calor úmido sob pressão (autoclave) a 121 °C por 20 minutos.

9. Precauções

- Montagem incorreta pode causar vazamento do medicamento
- Verificar ausência de corpos estranhos antes do uso;
- Supervisão obrigatória de adulto em uso infantil;
- Não remover válvula da máscara, mesmo para higienização;

10. Advertências

- Uso exclusivo conforme prescrição médica;
- Produto deve ser mantido fora do alcance de crianças;
- A **válvula (parte C)** é essencial para o funcionamento seguro do dispositivo.

11. Armazenamento e Transporte

- Temperatura de Armazenamento: 15°C a 30°C;
- Ambiente: Seco, limpo, protegido de luz solar direta, fontes de calor e impactos.

12. Fabricante

GoodDoctor Excelência em Saúde Ltda.

- CNPJ: 44.913.571/0001-92;
- I.E.: 636.482.631.115;
- AFE: 8.25998-1;
- Responsável Técnico: Clélia D. X. Cruz – COREN/SP 312.164;
- Email: sac@gooddoctor.ind.br.

13. Distribuidor

Cirúrgica Bonaparte Ltda.

- WhatsApp: 11) 9.3718.1020; Fone: (11) 4233-3434.
- E-mail:- vendas@cirurgicabonaparte.com.br.