

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Espaçador GoodDoctor

USO EXTERNO -ADULTO / INFANTIL

APRESENTAÇÃO

Embalagem contendo 01 **Espaçador** com uma máscara.

Cor disponível:- Amarelo

INDICAÇÃO DE USO

ADULTO /INFANTIL: faixa etária a partir de 3 anos.

COMPOSIÇÃO

Polipropileno, Pigmentos, Elastômeros e Silicone.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

É um produto para saúde, destinado ao uso domiciliar e hospitalar, desde que seja realizada a **sua desinfecção ou esterilização**.

Auxiliar e otimizar a administração de medicamentos inalatórios em aerossol, disponíveis em dosificados pressurizados.

Atua direcionando o jato do spray e propiciando a retenção das partículas grandes (propelente) a fim de evitar sua deposição na boca ou orofaringe do usuário e, simultaneamente, permitindo que as partículas menores (substância ativa) alcancem as vias aéreas de pequeno calibre. Possui uma válvula (parte C) de grande importância para assegurar a eficácia do uso do Espaçador, pois garante um fluxo unidirecional do medicamento (para a inspiração), impedindo que o ar expirado adentre a câmara (barreira contra retorno). Desta forma é evitada a diluição do medicamento quando do próximo acionamento de spray, garantindo o recebimento integral da dose. O produto foi desenvolvido para uso com máscara, de acordo com o tipo de paciente-crianças, adultos ou idosos - e orientação médica. A máscara cria um ambiente fechado, para que o usuário que não consiga sincronizar sua inspiração com o momento do acionamento do spray, receba a dose integral do medicamento, pois estará retido na máscara até que o usuário faça a inspiração.

A válvula pequena da máscara é fixa e não deve ser removida em nenhuma situação de uso ou limpeza, pois sua função é permitir a saída do ar na expiração do paciente e inviabilizar a entrada do ar exterior.

INDICAÇÃO

Indicado para pacientes com deficiência respiratória (asma, bronquite, DPOC etc.) que estejam sob tratamento ou cuidados de um profissional de saúde.

ADVERTÊNCIAS

O produto deve ser utilizado apenas para o fim a que se destina.

Mantenha o Espaçador, fora do alcance de crianças. Quando da utilização em crianças, é imprescindível a supervisão de um adulto.

O produto deve ser utilizado apenas para o fim a que se destina.

O produto não deve ter a válvula da máscara (parte E) removida, nem mesmo durante a higienização.

A VÁLVULA (PARTE C) É ESSENCIAL NA ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO PARA GARANTIR A SEGURANÇA E FUNCIONALIDADE DO PRODUTO, PORTANTO NÃO A REMOVA, A NÃO SER NO MOMENTO DA HIGIENIZAÇÃO.

PRECAUÇÕES

Realizar a **limpeza do produto, antes do primeiro e após cada uso**, seguindo as recomendações descritas nesta Instrução de Uso.

Em ambiente hospitalar, sob critério do profissional de saúde, conforme criticidade do paciente, é recomendável a desinfecção ou esterilização do produto.

Antes de usar o Espaçador, assegure-se de que não existem objetos estranhos dentro da câmara. Em caso positivo, realize novamente a limpeza.

A montagem do produto em desacordo com o estabelecido nesta Instrução de Uso pode ocasionar vazamento do medicamento, com consequente redução da eficácia no uso ao qual se destina.

COMO REALIZAR A HIGIENIZAÇÃO DO PRODUTO

Desmonte o Espaçador, **sem retirar a válvula da máscara** (ela deve ser mantida fixa). Lave todas as peças em água fria corrente, utilizando algumas gotas de detergente líquido neutro, em esponja macia (não abrasiva) e água. Enxágue bem.

Deixe escorrer o excesso de água. Não esfregue para secar. Deixe secar naturalmente, com a câmara (parte B) na posição vertical, imagem ilustrada.

PROCESSO DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DO PRODUTO

Para que o produto possa ser utilizado em âmbito hospitalar, recomenda-se que além da higienização, sejam realizados métodos para a desinfecção e/ou esterilização, selecionados conforme opção do profissional de saúde responsável. Foram testados dois métodos:

PARA DESINFECÇÃO

Imersão em Hipoclorito de Sódio (nas concentrações de 0,02 e 0,5%), durante 30 minutos.

PARA ESTERILIZAÇÃO

Submissão a calor úmido sob pressão (autoclavação), a 121°C durante 20 minutos.


COMO MONTAR O ESPAÇADOR

O produto só deve ser montado quando todas as peças estiverem completamente secas.

Monte o produto seguindo a ordem apresentada **conforme imagem ilustrada:-**

Imagem ilustrada

A - BASE ENCAIXE UNIVERSAL
B - CÂMARA / CORPO
C - VÁLVULA
D - TAMPA BOCAL
E - VÁLVULA MÁSCARA
F - MÁSCARA

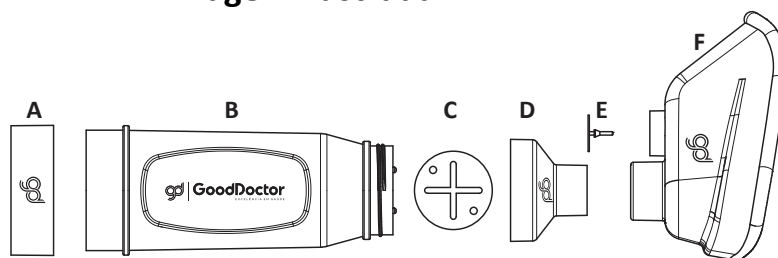


Etapas:-

- 1- Encaixe a base (A) na câmara (B);
- 2- Com a câmara na vertical, posicione os furos laterais da válvula (C) na direção dos pinos de fixação da câmara e encaixe-os perfeitamente. Os dois lados da válvula são idênticos;
- 3- Após a fixação o da válvula (C), encaixe o bocal (D) rosqueando até o final para que o sinta firme na mesma extremidade da câmara onde foi fixada a válvula. Em seguida, encaixe firmemente a máscara (F) no dispositivo. **O produto não deve ter a válvula da máscara (parte E) removida.**

COMO DEVO USAR ESTE PRODUTO

Após a limpeza e / ou esterilização do produto, certifique-se de que o produto está montado com todas as suas partes, conforme abaixo.

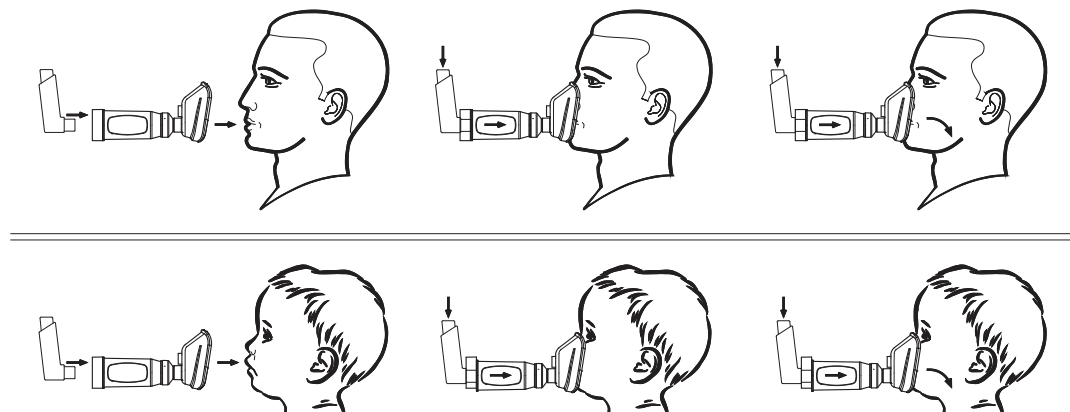

Observações: Ao finalizar a aplicação, para retirar o spray (bombinha) da base do Espaçador, fixe a base com uma das mãos e retire o spray com a outra.

Em caso de dúvidas quanto à dosagem e frequência de uso do medicamento, consulte o seu médico.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Este produto não contém látex
- Este produto não contém Bisfenol A

Se houver dúvidas sobre o desempenho ou uso do produto, por favor, contate preferencialmente o seu médico para obter instruções apropriadas;

Validade conforme em embalagem, sugerida substituição em até 24 meses após uso.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O produto deve ser mantido à temperatura ambiente, protegido contra poeira ou luz solar direta e resguardado de impactos. Para garantir a vida útil do produto, basta seguir cuidadosamente todas as instruções presentes no manual.

Fabricado por: GOODDOCTOR EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.

CNPJ: 44.913.571/0001-92. **I.E.:** 636.482.631.115. **AFE:** 8.25998-1

Registro Anvisa:- 82599819002 **Responsável Técnico:-** Clélia D. X. CRUZ -

COREN/SP 312.164**SAC:-** sac@gooddoctor.ind.br